

EZCOVER® / EZCOVER® STOP

Anweisung zur Anlage



1. Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie das Ultraschallset und packen den Schallkopfbezug aus.



2. Klappen Sie den gelben „HAND IN HERE“-Aufkleber um und legen Sie die Hand in die vorgegebene Öffnung der Faltung.



3. Schieben Sie Ihre Hand komplett in die Öffnung.



4. Spannen Sie den Bezug mit den Fingern auf. Geben Sie etwas steriles Gel (beiliegend) auf den Bezug (dort wo der Schallkopf aufgesetzt werden soll) oder auf den Schallkopf.



5. Lassen Sie sich den Schallkopf anreichern oder greifen Sie ihn selbst.
Bei STOP-Variante: Schallkopf auf „PROBE HERE“-Aufkleber platzieren.



6. Ziehen Sie den Bezug am „PULL HERE“-Aufkleber über Schallkopf und Kabel.



7. Fixieren Sie den Bezug mit den beiliegenden Gummibändern.



8. Bei STOP-Variante: Führen Sie den Sicherheits-Check durch und entfernen Sie im Anschluss den „STOP“ Aufkleber.



9. Streichen Sie den Schallbereich glatt, sodass keine Luftblasen unter dem Bezug zurückbleiben.

